

ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ ПРОДУКТЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ЕДИНСТВЕНО ОТ СТОМАТОЛОГ

СЪСТАВ: Цинков оксид, цинков сулфат, калциев сулфат, помощни вещества.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Препаратът CAVIPACK е предназначен за временно запълване на зъб и за временно затваряне на отворите на кореновите канали при ендодонтско лечение.

CAVIPACK е готова за употреба паста, която не изисква да се приготвя предварително.

Не съдържа евгенол. Свързва се химически под влияние на влага (слюнка).

Да се използва при кариес от клас I и II.

НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Кариесът в зъба да се намокри с водна струя. Нанесете материала в кариеса с помощта на съответния инструмент, кондензирайте, като притискате леко до стените на кариеса. Пригответе формата на пломбата към захапката.

Повърхността на материала се втвърдява за 20-30 мин. под влияние на слюнката.

Да се избягва гризене за 2-3 часа.

Да се отстранява от кариеса с помощта на машина или скалер, остатъците да се изплакнат с водна струя.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при пациенти, алергични към съставките на препарата.

Да не се използва като временно запълване на многопластови кариеси.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Предизвиква сериозно изгаряне на кожата и увреждане на очите. При контакт с продукта внимателно промийте с голямо количество вода. Може да предизвика алергична реакция на кожата.

Потърсете медицинска помощ.

В случай на консумация пийте много вода, не предизвиквайте повръщане. Свържете се с лекар, ако имате оплаквания. При работа с продукта използвайте кофердам. Да се използват ръкавици, предпазни дрехи и очила.

При сериозен инцидент, свързан с изделието, трябва да се уведоми производителя и съответния орган по местожителство на потребителя или пациента.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в оригинална опаковка при температура под 25°C.

Да се пази от влага. След всяка употреба затваряйте плътно опаковката. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Срокът на годност се намира на самата опаковка.

След отваряне на опаковката срокът на годност не се променя, ако след всяка употреба се затваря плътно.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРАЗНАТА ОПАКОВКА

Празните опаковки да се изхвърлят съгласно приетите разпоредби.

ОПАКОВКА

Спринцовка с 5 g препарат. Опаковка, съдържаща 3x10 g от препарата.

Дата на последна актуализация: 25.08.2023/5