


Апарат за измерване на кръвно налягане за предмишница Dr.Mayer

Модел: DRM-BPM60EH

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

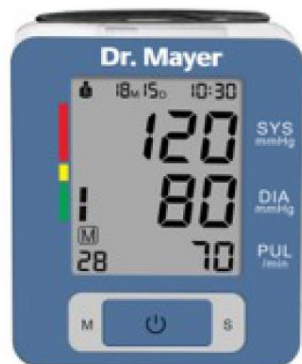

- Голям LCD дисплей
- 2x90 памет /по 90 записа за всеки потребител/
- Индикатор WHO

Съдържание

Въведение 1

Информация за безопасност 2

Структура на продукта 3

Поставяне на батериите 3

Режим на настройка 4

Правилно използване на уреда 4

За кръвното налягане 5

Извънредни ситуации 7

Грижи и поддръжка 7

Спецификация 8

Информация относно гаранцията 8

EMC декларация /EN/ 9

Въведение

- Благодарим Ви, че закупихте Апарата за измерване на кръвно налягане за предмишница Dr.Mayer. Моля, прочетете внимателно ръководството преди да използвате уреда и го пазете добре след употреба.
- Уредът е компактен и лесен за използване, въз основа на осцилометричния принцип. Той измерва кръвното Ви налягане и пулса просто и бързо. Устройството използва своя усъвършенстван „Intellisense“ за удобно контролируемо надуване без нужда от предварително задаване на налягане или повторно надуване. Този уред се прилага само за възрастни.
- 2x90 задава функция на паметта, всеки резултат от измерването се показва на екрана и автоматично се съхранява.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ










Уредът е предназначен за измерване на систоличното налягане, диастоличното налягане и пулса на китката на ръката. Употреба - в дома, в болнична среда. Предназначен за възрастни над 12 години.

Информация за безопасност


• За да се гарантира правилното използване на продукта, винаги трябва да се спазват основните мерки за безопасност и предупрежденията, изброени в ръководството за употреба:

Описания на символи

Следните символи могат да се появят в това ръководство, на етикета, на устройството или на аксесоарите към него. Някои от символите представляват стандарти и съответствие, свързани с устройството и неговата употреба.

	Този символ идентифицира опасности, които могат да причинят сериозни телесни наранявания или смърт.
 ВНИМАНИЕ:	Този символ идентифицира опасности, които могат да причинят леки телесни наранявания, повреда на продукта или материални щети.
	Приложена част тип ВF
	Производител
SN	Указва сериен номер
	Оторизиран представител в Европейската общност
	СЕ марка: отговаря на съществените изисквания на Директива 93/42/ЕИО за медицинските изделия.
	ИЗХВЪРЛЯНЕ: Не изхвърляйте този продукт като несортирани битови отпадъци. Необходимо е отделно събиране на такива отпадъци за специално третиране.
	Постоянен ток
	Следвайте инструкциите за употреба.


- ▲ Хора, които имат аритмия, диабет, проблеми с кръвообращение или апоплексия, моля, използвайте по указание на лекаря.
 - ▲ Свържете се с Вашия лекар за конкретна информация за Вашето кръвно налягане. Самодиагностиката и самолечението могат да бъдат опасни. Следвайте инструкциите на Личния си лекар или лицензиран здравен персонал.
 - ▲ Моля, съхранявайте уреда на недостъпни за деца места.
 - ▲ Не се допуска промяна на това оборудване.
 - ▲ Не модифицирайте оборудването без разрешение на производителя.
 - ▲ Ако това оборудване е модифицирано, трябва да се извърши подходяща проверка и изпитване, за да се осигури продължителна безопасна употреба.
 - ▲ Маркучът на маншета може да причини задушаване около врата.
 - ▲ Поглъщането на малки части като опаковъчна торба, батерия, капак на батерията и т.н. може да причини задушаване.
 - ▲ Моля, не използвайте разреждател, алкохол или бензин за почистване на уреда. Моля, не позволявайте удари и изпускане на уреда. Използвайте правилния маншет, в противен случай уредът не може да работи.
 - ▲ Никога не оставяйте изтощена батерия в отделението за батерии, тъй като те могат да изтекат и да повредят устройството.
 - ▲ Моля, извадете батерията, ако няма да използвате уреда 3 месеца.
 - ▲ Сменете батериите с нови, ако устройството показва символ на изтощена батерия.
 - ▲ Не смесвайте старите и новите батерии.
 - ▲ Не използвайте мобилен телефон близо до устройството. Това може да доведе до проблеми в работата.
 - ▲ Моля, избягвайте използването във силно радиационна среда, за да получите правилни резултати.
 - ▲ Не използвайте оборудването, където има запалими газове (като анестетичен газ, кислород или водород) или запалими течности (като алкохол).
- ▲ **ВНИМАНИЕ:**

 Не изхвърляйте електрическите уреди като несортирани битови отпадъци, използвайте съоръжения за разделно събиране. Свържете се с местното управление за информация относно наличните системи за събиране на отпадъци. Ако електрическите уреди се изхвърлят на сметища, опасни вещества могат да изтекат в подпочвените води и да попаднат в хранителната верига, увреждайки вашето здраве и благосъстояние.


Класификация

1. Оборудване с вътрешно захранване.
2. Приложена част Тип ВF.
3. Защита срещу проникване на вода или прахови частици: IP21.
4. Не е категория АР/АРG оборудване.
5. Режим на работа: Непрекъсната работа.

- ▲ Потребителят трябва да провери дали оборудването функционира безопасно и да се увери, че е в добро работно състояние, преди да го използва.

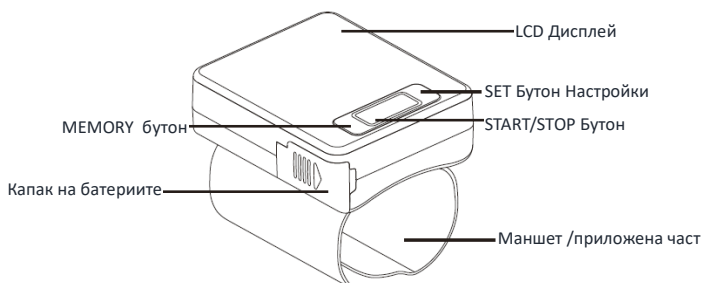

Дисплей

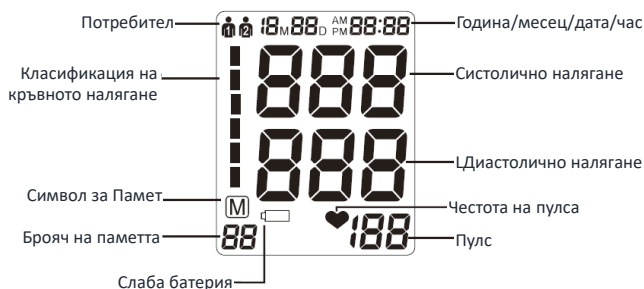

Допълнителни компоненти

Батерии (Опция)




1,5 x 2 AAA алкални батерии

Кутия за съхранение



Поставяне на батериите

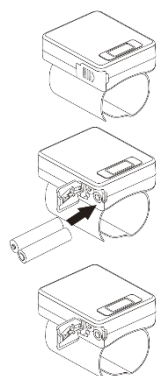

1. Натиснете капачето както е показано на изображението
2. Поставете две **1,5 x AAA** правилно ориентирани с „+“ и „-“
3. Поставете капачето, докато чуete клик.

Смяна на изтощени батерии

• Когато се появи символът за изтощена батерия  след като устройството бъде включено, трябва да смените батериите с нови, в противен случай устройството няма да работи.

- Моля, използвайте 2 броя AAA идентични 1.5V алкални батерии.
- Не използвайте батериите след изтичане на срока им на годност.
- Моля, извадете батериите, ако няма да използвате апарата за дълъг период.





▲ ВНИМАНИЕ:

Изхвърлете батерията в съответствие с местните закони. За да избегнете опасност от пожар и експлозия, не палете и не изгаряйте батерията.

Режим на настройка

Как да настроите


1. Как да настроите потребителя:

Натиснете бутона „S” при изключено захранване, на екрана ще се покаже  или , натиснете бутона „M”, за да смените между  и , натиснете бутона „S”, за потвърждение на потребителя, след това ще влезете в режим за настройка на годината.




2. Настройка на годината:

Продължете като горната стъпка, на екранът ще мига 20XX, последната цифра от годината ще се увеличи 1 всеки път, когато натискате бутона „M”, можете да избирате от 2001 до 2099. Натиснете бутона „S”, за да потвърдите годината, след това ще влезе в режим на настройка на месец и дата.

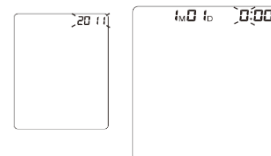


3. Настройка на месец и дата:

Продължете като горната стъпка, на екрана ще се покажат xMxxD и XX-XX, и ще продължи да мига през месеца, цифрата ще се увеличи 1 всеки път, когато натискате бутона „M”, можете да избирате от 1 до 12. Натиснете бутона „S”, за да потвърдите месеца, след което ще определите датата. Всеки път, когато натиснете бутона „M”, цифрата ще се променя от 01 до 31. Натиснете бутона „S”, за да потвърдите датата, след това ще влезете в режим за настройка на часа.

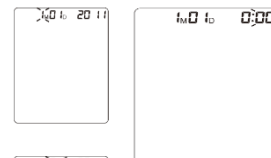

4. Настройка на часа:

Продължете като горната стъпка, на екрана ще се покажат xMxxD и XX: XX, цифрите на часа ще мига, всеки път, когато натиснете бутона „M” ще се променя с 1, можете да избирате от 0 до 23. Натиснете бутона „S”, за да потвърдите часа, цифрите на минутата започват да мигат. Всеки път, когато натиснете бутон „M”, цифрите ще се променят от 00 до 59. Натиснете бутона „S”, за да потвърдите минутите. След това, общата настройка е завършена.

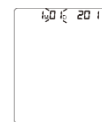

Правилно използване на уреда

Преди измерването:

- Отпуснете се за около пет до десет минути преди измерването. Избягвайте да ядете, пиете алкохол, пушите, спортувате и се къпете в продължение на 30 минути, преди да направите измерване. Всички тези фактори ще повлияят на резултата от измерването.
- Свалете дрехите, които прилягат плътно към горната част на ръката на измерване.
- Винаги измервайте на една и съща ръка (обикновено вляво).
- Измервайте редовно по едно и също време на всеки ден, тъй като кръвното налягане варира по време на деня.

Често срещани фактори при погрешно измерване:

- Опитите на пациента да поддържа ръката си могат да повишат кръвното налягане.
- Уверете се, че сте в удобна, отпусната позиция и не активирайте нито един от мускулите в измервателната ръка по време на измерването. Използвайте възглавница за подложка, ако е необходимо.
- Ако артериата на ръката е на ниво по-ниско или по-високо от нивото на сърцето, ще се получат фалшиви показания.

Забележка:

- Разхлабеният маншет причинява фалшиво отчитане.
- При многократни измервания кръвта се натрупва в китката, което може да доведе до фалшиво отчитане. Последователните измервания на кръвното налягане трябва да се повтарят след 1 минутна пауза или след като ръката е била вдигната, за да може натрупаната кръв да се изтече.


Поставяне на маншета

1. Вдигнете ръкава. Уверете се, че ръкавът ви не стяга твърде плътно ръката ви. Това може да ограничи притока на кръв в ръката ви.

2. Увийте маншета директно върху кожата си, задръжте долната част на маншета и го увийте около китката, така че да приляга удобно и сигурно около китката ви, както се вижда на изображението.



3. Седнете и заемете изправена стойка на тялото. Позиционирайте ръката с апарата на нивото на сърцето си.

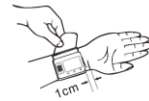

4. Натиснете бутона START/STOP, апаратът автоматично ще измери кръвното Ви налягане. Моля, останете неподвижни, докато трае процеса.



Ако не е възможно да поставите маншета на лявата китка, той може да бъде поставен и отдясно. Всички измервания трябва да се правят с една и съща китка.

Процедура за измерване:


След като маншетът е поставен правилно, измерването може да започне:

- 1) Натиснете бутона START/STOP, всички символи се появяват на дисплея, след това помпата започва да надува маншета, нарастващото налягане в маншета се показва на дисплея.
- 2) След достигане на подходящото налягане, помпата спира и налягането постепенно пада. Показва се налягането на маншета. В случай, че надуването не е достатъчно, устройството автоматично се надува отново до по-високо налягане.
- 3) Когато устройството открие сигнала, символът на сърцето на дисплея започва да мига.
- 4) Когато измерването приключи, систоличната, диастоличната и пулсовата честота ще се появят на дисплея.
- 5) Показанията за измерване остават на дисплея, докато не изключите устройството. Ако не бъде натиснат бутон за период от 3 минути, устройството се изключва, за да спести енергия.



Прекратяване на измерване

Ако е необходимо да се прекъсне измерването на кръвното налягане по някаква причина (напр. Пациентът се чувства зле), бутонът СТАРТ/СТОП може да бъде натиснат по всяко време. Устройството автоматично намалява налягането на маншета.

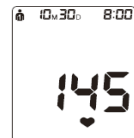

Показване на записите на измерванията

Този апарат за кръвно налягане автоматично съхранява 2x90 /за всеки от двамата потребители по 90 записа/стойности на измервания. При надвишаване запис 90, се изтрива най-старият запис.




Прочитане на записи в паметта

Натиснете бутона M при изключено захранване, ще се покаже средната стойност на последните 3 измервания. Натиснете отново бутона M, за да се покаже най-новата памет, натиснете бутона S, за да се покаже най-старата памет, последващите измервания могат да бъдат показани едно след друго, с натискане на бутона M или бутона S.

Памет – изчистване на записите


Ако сте сигурни, че искате да премахнете завинаги всички съхранени записи, натиснете бутона S за 7 пъти, докато CL се появи при изключено захранване, натиснете бутона START/STOP, CL ще мига 3 пъти за да се изчисти паметта. След това натиснете бутона M и на дисплея ще се покаже "не", което означава, че няма записи в паметта.

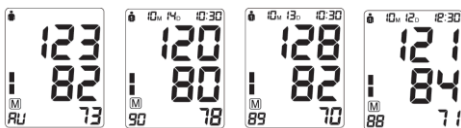


За кръвното налягане

Кръвното налягане е налягането, упражнявано от артериите. Стойността на систоличното кръвно налягане представлява кръвното налягане, произведено от свиването на сърдечния мускул. Стойността на диастоличното кръвно налягане представлява кръвното налягане, получено при отпускане на сърдечния мускул.


Систолично налягане

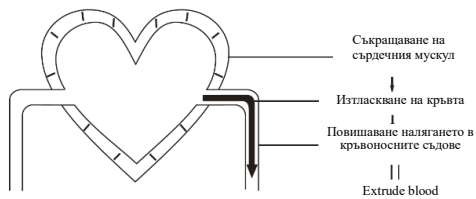

Диастолично налягане

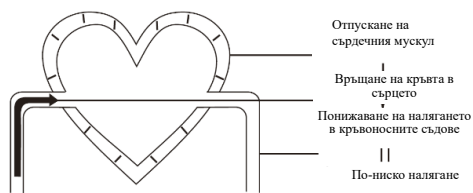

- Според класификацията на кръвното налягане от СЗО/ISH.
- SYS по -ниска от 100 mmHg (13,3 kPa) се счита за хипотония

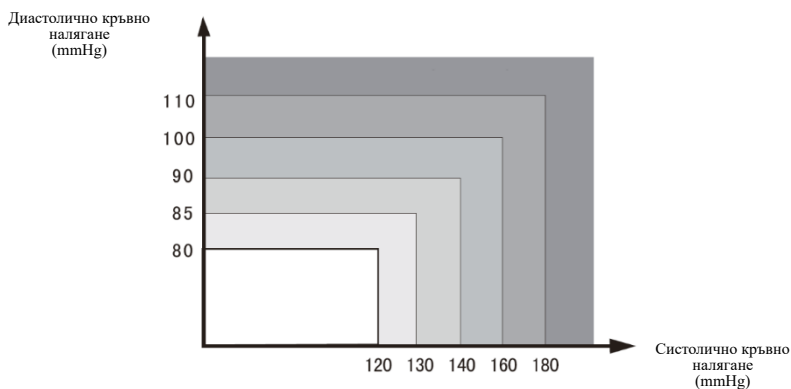


Типове налягане




Извънредни ситуации

Индикатори за грешки

Следните символи се появяват на дисплея при ненормално измерване.



Символ	Причина	Действие
E-1	Слаб сигнал или рязка промяна на налягането	Wrap the cuff properly. Remeasure with correct way.
E-2	Силно външно влияние	Измерването ще се компрометира, ако в близост е разположен клетъчен телефон или друго високочестотно устройство. Запазете спокойствие и тишина докато правите измерване. Не говорете.
E-3	It appears error during the process of inflating	Правилно поставете маншета. Уверете се, че маркучът е правилно поставен в устройството. Направете ново измерване.
E-5	Кръвно налягане извън нормите	Повторете измерването, след почивка от 30 мин. Ако в три поредни измервания регистрирате необичайни стойности, моля, свържете се с лекаря си.
	Слаби батерии	Поставете нови батерии.

Отстраняване на грешки





Проблем	Проверка	Причина и решение
Няма мощност	Проверете нивото на батериите	Поставете нови батерии
	Проверете полярността на батериите	Поставяне на батериите в правилната полярност
Не започва да напompва	Проверете дали е свързан конектора	Поставете в конектора за въздух плътно
	Дали конекторът е счупен	Сменете с нов маншет
Егг и спира работа	Дали не движите ръката по време на измерване	Тялото трябва да е в покой
	Дали не приказвате при измерване	Пазете тишина по време на измерване
Маншетът изпуска	Дали маншетът не е прекалено разхлабен	Стегнете маншета
	Повреден маншет	Сменете с нов маншет
	Моля, свържете се с дистрибутора, ако не успявате да решите проблема! Не разглабяйте уреда сами!	

Грижи и поддръжка

Грижа за монитора

<ul style="list-style-type: none"> • Дръжте устройството в калъф за съхранение, когато не го използвате. • Почиствайте устройството с мека суха кърпа. Не използвайте абразивни или летливи почистващи препарати. • Никога не потапяйте уреда или който и да е компонент във вода. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Уверете се, че мониторът е изключен преди почистване, може да се използва смес от дестилирана вода и 10 % белина. • С помощта на бутилка със спрей навлажнете мека кърпа с белина или миещ препарат, докато се насити напълно. Изстискайте излишната влага от кърпата, за да избегнете капене или потенциално пренасищане на маншета. • Избършете добре всички повърхности на маншета за измерване на кръвното налягане, като внимавате да почистите маншета отвътре и отвън. Внимавайте да не попадне влага в основното устройство. • С помощта на суха кърпа внимателно избършете излишната влага, която може да остане върху маншета за кръвно налягане. Поставете маншета в разгънато положение и оставете маншета да изсъхне на въздух. 	

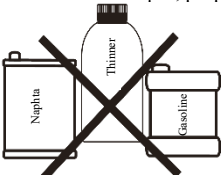Поддръжка
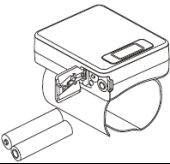
<p>Не почиствайте тялото и маншета с нафта, разреждател или бензин и др.</p> 	<p>Не мокрете маншета и не се опитвайте да го почистите с вода.</p> 
<p>Съхранявайте устройството на чисто и сухо място. Не излагайте устройството на екстремни горещи или студени температури, влажност и пряка слънчева светлина.</p> 	<p>Извадете батериите, ако устройството няма да се използва след 3 или повече месеца.</p> 
<p>Ние няма да носим отговорност за проблем с качеството, ако не ви е грижа и поддържате продукта според инструкциите.</p>	

Спецификация

Описание	Апарат за измерване на кръвното налягане на китката	
Дисплей	LCD дигитален дисплей	
Принцип на работа	Осцилометричен метод	
Локализация на измерването	Китка	
Диапазано на измерването	Налягане	0~299 mmHg
	Пулс	40~199 pulses/min
Точност	Налягане	±3 mmHg
	Пулс	±5% за измерване
LCD индикации	Налягане	3 цифров дисплей mmHg
	Пулс	3 цифров дисплей
	Символ	Памет/Удари на сърцето/Ниско ниво на батерията
Функция памет	2x90 записа на направени измервания	
Източник на напрежение	2 броя AAA алкални батерии DC 3V	
Автоматично изключване	след 3 минути	
Тежест на основното тяло	Прибл. 122 g (без батерии)	
Размер на основното тяло	L78mm x W65mm x H65mm	
Живот на основното тяло	10,000 измервания при нормални обстоятелства	
Живот на батерията	300 измервания при нормални условия	
Акcesoари	Ръководство за употреба, кутия за съхранение	
Условия на работната среда	Температура	5~40 °C
	Влажност	15%~93%RH
	Въздушно налягане	86kPa~106kPa
Условия на съхранение	Температура: -20°C ~ 55°C	
	Влажност: 10% ~ 93%RH	
	Избягвайте удари, директно слънце и дъжд по време на транспорт.	

Информация относно гаранцията

Изявление

- Предназначение: уредът е предназначен за употреба от възрастни у дома или в медицински центрове за измерване на кръвното налягане и пулса на китката на ръката.
- Уредът отговаря на изискванията на EN ISO 81060-1 Част 1 Неинвазивни сфигмоманометри, EN 1060-3: 1997+A2: 2009 Неинвазивни сфигмоманометри. IEC80601-2-30 Част 2 Неинвазивни сфигмоманометри.
- Измерванията на кръвното налягане, определени с това устройство, са еквивалентни на тези, получени от обучен наблюдател, използващ аускултативен метод на маншета/стетоскопа, в границите, предписани от Американския национален стандарт, ръчни, електронни или автоматизирани сфигмоманометри.
- Рискът за пациента и потребителя може да бъде намален до приемливо ниво.
- Гарантирано е, че устройството няма дефекти в изработката и материалите при нормална употреба за период от две години от датата, посочена в документа за покупка.
- За ремонт по тази гаранция, нашият оторизиран сервизен агент трябва да бъде информиран за грешката в периода на гаранцията. Тази гаранция покрива части и труд само при нормални операции. Всеки дефект в резултат на естествени причини, напр. наводнение, ураган и др. не е в рамките на тази гаранция. Тази гаранция не покрива щети, причинени от използването на уреда, които не са в съответствие с инструкциите, случайни повреди, или подправяне или обслужване от неоторизирани сервизни агенти.
- Монитор, подложен на злоупотреба и пренебрегване на това ръководство, с неинструктивни цели: неоторизиран ремонт или модификации ще бъдат изключени от тази гаранция.

⚠ Устройството не изисква калибриране.

⚠ Устройството не може да се поправя и не съдържа обслужвани от потребителя части.

EMC декларация /EN/

IEC 60601-1-2: 2014 **ME EQUIPMENT** и **ME SYSTEMS** Идентификация, маркировка и документи за продукт от клас B

Инструкции за употреба

ME EQUIPMENT или ME SYSTEM е подходящ за домашна здравна среда и така нататък.

Предупреждение: Не се доближавайте до активно хирургично оборудване с ВЧ и стаята с радиочестотна защита на ME система за магнитно-резонансна томография, където интензивността на ЕМ смущенията е висока.

Предупреждение: Използването на това оборудване в съседство или подредено с друго оборудване трябва да се избягва, защото това може да доведе до неправилна работа. Ако такава употреба е необходима, това оборудване и другото оборудване трябва да се наблюдават, за да се провери дали те работят нормално.

Предупреждение: Използването на аксесоари, преобразуватели и кабели, различни от посочените или предоставени от производителя на това оборудване, може да доведе до повишени електромагнитни емисии или намалена електромагнитна устойчивост на това оборудване и да доведе до неправилна работа.

Предупреждение: Преносимо радиокommunikационно оборудване (включително периферни устройства, като антени кабели и външни антени) трябва да се използва не по -близо от 30 см (12 инча) до всяка част от оборудването (подробно име на модела), включително кабели, посочени от производителя. В противен случай това може да доведе до влошаване на работата на това оборудване.

Ако има: списък на всички кабели и максимална дължина на кабелите (ако има такива), преобразуватели и други АКСЕСОАРИ, които могат да се заменят от ОТГОВОРНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ и които е вероятно да повлияят на съответствието на ME ОБОРУДВАНЕТО или СИСТЕМАТА МЕН с изискванията на точка 7 (ЕМИСИИ) и клауза 8 (ИМУНИТЕТ). АКСЕСОАРИТЕ могат да бъдат определени по общ начин (например екраниран кабел, импеданс на натоварването) или конкретно (например чрез ПРОИЗВОДИТЕЛ и ОБОРУДВАНЕ ИЛИ ТИПОВА РЕФЕРЕНЦИЯ).

Ако има: производителността на **ME ОБОРУДВАНЕТО** или **СИСТЕМАТА ME**, която е определена като **НЕОБХОДИМА ЕФЕКТИВНОСТ** и описание на това какво ОПЕРАТОРЪТ може да очаква, ако **СЪЩЕСТВЕНАТА ЕФЕКТИВНОСТ** е загубена или влошена поради **ЕМ НЕВЪЗМОЖНОСТИ** (дефинираният термин „НЕОБХОДИМА ЕФЕКТИВНОСТ“ не е необходимо използван).

Техническо описание

1. Всички необходими инструкции за поддържане на **ОСНОВНА БЕЗОПАСНОСТ** и **СЪЩЕСТВЕНА ЕФЕКТИВНОСТ** по отношение на електромагнитни смущения за изключения експлоатационен живот.
2. Ръководство и декларация на производителя -електромагнитни емисии и имунитет

Таблица 1

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic emissions	
Emissions test	Compliance
RF emissions CISPR 11	Group 1
RF emissions CISPR 11	ClassB
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Not applicable
Voltage fluctuations/ flicker emissions IEC 61000-3-3	Not applicable

Таблица 2

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic Immunity		
Immunity Test	IEC 60601-1-2 Test level	Compliance level
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV contact ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV air	±8 kV contact ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV air
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	Power supply lines: ±2 kV Input/output lines: ±1 kV	Not applicable
Surge IEC 61000-4-5	line(s) to line(s): ±1 kV. line(s) to earth: ±2 kV. 100 kHz repetition frequency	Not applicable
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	0% 0.5 cycle At 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315° 0% 1 cycle And 70% 25/30 cycles Single phase: at 0 0% 300 cycle	Not applicable
Power frequency magnetic field IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz/60Hz	30 A/m 50Hz/60Hz
Conducted RF IEC61000-4-6	150KHz to 80MHz: 3Vrms 6Vrms (in ISM and amateur radio bands) 80% Am at 1 kHz	Not applicable
Radiated RF IEC61000-4-3	10V/m 80 MHz- 2,7 GHz 80% AM at 1 kHz	10V/m 80 MHz-2,7 GHz 80 % AM at 1 kHz

NOTE: U_T is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.

Таблица 3

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity							
	Test frequency (MHz)	Band (MHz)	Service	Modulation	Modulation (W)	Distance (m)	IMMUNITY TEST LEVEL (V/m)
Radiated RF IEC6100 0-4-3 (Test specifications for ENCLOSURE PORT IMMUNITY TO RF wireless communications equipment)	3850	380-390	TETRA-400	Pulse modulation 18 Hz	1.8	0.3	27
	450	430-470	GMRS 460, FRS 460	FM \pm 5kHz deviation 1kHz sine	2	0.3	28
	710	704 - 787	LTE Band 13, 17	Pulse modulation 217 Hz	0.2	0.3	9
	745						
	780						
	810	800 - 960	GSM 800/900, TETRA 800, IDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Pulse modulation 18 Hz	2	0.3	28
	870						
	930	1700-1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1, 3, 4, 25; UMTS	Pulse modulation 217 Hz	2	0.3	28
	1720						
	1845						
	1970	2400-2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Pulse modulation 217 Hz	2	0.3	28
	2450						
	2450						
5240	5100-5800	WLAN 802.11 a/n	Pulse modulation 217 Hz	0.2	0.3	9	
5240							
5785							

Инструкция за допълване на техническия индикатор

Защита от електрически удар	клас II
Степен на противопожарна защита	тип BF приложена част
Режим на работа	Непрекъсната работа
Степен на водозащита	IP21
Живот на продукта	2 години
Стерилен	НЕ
Употреба в наситена с КИСЛОРОД среда	НЕ



Manufacturer
Shenzhen Urion Technology Co.,Ltd.
Floor 4-6th of Building D, Jiale Science & Technology Industrial Zone, No. 3, ChuangWei Road, Heshuikou Community, MaTian Street, GuangMing New District, 518106 ShenZhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: (86) -755-29231308 E-mail:urion@urion.com.cn
MADE IN CHINA

