

**Aspi-Clear** - концентрат за почистване и дезинфекция на аспирации

**Предимства:**

Невъзпламенителна формула за почистване и дезинфекция на аспирационни системи, сепаратори за амалгами и аксесоари към стоматологичните апарати.

Без пяна.

При ежедневно приложение предотвратява появата на биофилм.

Може да се използва за дезинфекция на затворени вериги на хидромасажни вани.

Препоръчителен продукт за използване от професионални потребители.

**Микробиологична ефективност:**

Бактерии (включително MRSA) съгласно EN 13727 (ниско и повишено органично натоварване) 1% - 15 минути.

Гъбички (*C. albicans*) съгласно EN 13624 (ниско органично натоварване) 1% - 15 минути, EN 13624 (органичен товар увеличен) 1% - 30 минути и 2% - 15 минути.

Микробактерии (*M. Туберкулоза*) съгласно EN 14348 (увеличен органичен товар): 4% - 60 минути.

Капсулирани вируси съгласно: EN 14476 (ниско и повишено органично натоварване) 2% - 15 минути.

**Инструкции за употреба:**

Концентратът трябва да се разрежда с вода.

За да се получи концентрация 2%, разредете 20 ml концентриран разтвор в 980 ml вода.

**Употреба в аспирационни системи:**

Излейте разтвора в аспирационната система, в зависимост от степента на замърсяване, веднъж или два пъти на ден.

Аспирирайте цялата течност, спрете аспирацията и изчакайте около 15 минути.

След дезинфекцирането изплакнете аспирационната система с вода.

Изплакването може да се извърши след препоръчаното време за дезинфекция или в деня след стартирането на устройството.

Не смесвайте с други почистващи или дезинфекционни средства.

**Използване в хидромасажни вани:**

Преди първа употреба, изплакнете устройството с вода, за да премахнете следи от предишни препарати

Напълнете ваната с чиста вода до нивото над дюзите.

Добавят се 200 ml към 10 l вода.

Включва устройството за 15 минути.

След употреба, изчистете ваната и изплакнете с вода.

Не смесвайте с други препарати.

Не използвайте продукта по време на терапевтичната вана на пациента.

**Съставки:**

100 g препарат съдържа: 4.4 g диоктил-диметил амониев хлорид (CAS: 5538-94-3), 0.6 g амониев хлорид додецилдиметил бензил (CAS: 85409-22-9)

**Предпазни мерки:**

Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозни наранявания на очите.

Препоръчва се използването на защитно облекло: защитни ръкавици, защитно облекло, предпазни очила, защитни маски. Свържете се незабавно с Вашия лекар или специализиран център.

При контакт с кожата (или косата): Незабавно свалете замърсеното облекло. Изплакнете кожата с вода или душ.

В случай на контакт с очите: изплакнете обилно с вода в продължение на няколко минути. Премахнете контактните лещи в случай на нужда или ако могат лесно да се свалят. Продължете да промивате.

Съдът и съдържанието се отстраняват в съответствие с националните правила.

Съдържа <5% нейонни повърхностноактивни вещества.

Повърхностноактивните агенти отговарят на правилата за биоразграждане съгласно Рег. 648/2004

**Описание:**

Aspi-Clear - 1 контейнер x 1 L, 5L

**Дистрибутор в България:**

**Дентстор България ЕООД**

1379 гр. София, България, Бул. Акад. Иван Евстратиев Гешов 2Е,

БЦ Сердика, сграда 5

Тел./Факс: +359 2 451 83 30

E-mail: [orders@dentstore.bg](mailto:orders@dentstore.bg)

Сайт: <https://dentstore.bg/>