

Дезинфектант Ezo-Extreme - ензимен концентрат за почистване и дезинфекция на медицински инструменти.

Предимства:

- Много ефективен продукт за едновременно почистване и дезинфекция на хирургически и ротационни инструменти;
- Изключителни почистващи свойства;
- Широк микробиологичен спектър;
- Бързо действие;
- Антикорозионни свойства и добра съвместимост с материалите;
- Препоръчва се за инструменти от неръждаема стомана, никел, мед, алуминий, каучук, порцелан, стъкло и пластмаса.

Микробиологична ефективност:

- Бактерицидно (включително MRSA) съгласно: EN13727: 0.5% - 15 минути; EN 14561: 1% - 15 минути; 0.5% - 30 минути;
- Фунгицид (*Candida albicans*) съгласно: EN13624: 0.5% - 15 минути; EN14562: 1% - 15 минути; 0.5% - 30 минути;
- Микобактерицид (*M. avium*, *M. Terrae*) съгласно: EN14348: 0.5% - 15 минути (ниско органично натоваарване); 0.5% - 30 минути; 1% - 15 минути; EN14563: 1% - 15 минути (ниско органично натоваарване); 2% - 15 минути; 0.5% - 15 минути;
- Аденовирус съгласно: EN 14476: 0.5% - 15 минути (ниско органично натоваарване); 0.5% - 30 минути;
- Вирус на полиомиелит: EN14476: 0.5% - 30 минути (ниско органично натоваарване); 1% - 15 минути;
- Капсулирани вируси с обвивка: (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, Ebola, BVDV) съгласно EN14476: 0.5% - 15 минути (ниско органично натоваарване).

Състав (100g): 0.11.5 g N- (3-аминопропил) -N-додецилпропано-1,3-диамин (CAS: 2372-82-9); 3,12 g поли-9-окси-1,2-етандиова киселина, а- [2-9-дидецилметиламино) етил] -оксим-хидроксипропаноат (CAS: 94667-33-1); 1,25 g дидецилдиметиламониев хлорид (CAS: 7173-51-5).

Мерки за безопасност:

- Вреден при поглъщане;
- Предизвиква сериозни изгаряния и наранявания на очите;
- Може да причини увреждане на органите при продължителна или многократна експозиция;
- Вреден за водните организми, с дълготрайни последствия;
- Не изхвърляйте в околната среда;
- Препоръчваме да носите предпазни средства (ръкавици, дрехи, очила и маска);
- При поглъщане: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане;
- При контакт с кожата или косата: Незабавно свалете замърсеното облекло. Изплакнете кожата / душ;
- В случай на контакт с очите - изплакнете обилно с вода за няколко минути, отстранете контактните лещи, ако е необходимо и ако това може да се направи лесно, изплакнете обилно. Консултирайте се с Вашия лекар, ако симптомите продължават;
- Съгласно Регламент 648/2004 той съдържа <15% - 30% катионни повърхностноактивни вещества и <5% анионни повърхностно активни вещества, парфюм (LIMONEN), ензими (субтилизин);
- Активните компоненти отговарят на изискванията на Регламент 648/2004 за биоразградимост.

Начин на употреба:

- Разтворът се приготвя чрез разреждане на концентрата във вода, съгласно желаната концентрация, посочена по-долу;
- За да се получи концентрация от 0.5%, се разреждат 5 ml концентрат в 995 ml вода;
- Веднага след употреба инструментите се поставят в разтвора;
- Всички части и отвори трябва да бъдат напълно запълнени и покрити с разтвора;
- Дезинфекцираните инструменти се изплакват с вода и се изсушават;
- Незаразеният приготвен разтвор е активен в продължение на 14 дни;
- Поради хигиенни съображения се препоръчва да се подменя ежедневно разтвора;
- Не комбинирайте с други препарати или дезинфектанти;
- Продукт, предназначен за професионална употреба.

Описание:

- **Дезинфектант Ezo-Extreme** - 1 бутилка x 1L, 5L

Дистрибутор в България:

Дентстор България ЕООД

1379 гр. София, България, Бул. Акад. Иван Евстратиев Гешов 2Е,

БЦ Сердика, сграда 5

Тел./Факс: +359 2 451 83 30

Е-mail: orders@dentstore.bg

Сайт: <https://dentstore.bg/>