

Green Neutral - Готов за употреба алкохолен разтвор за почистване и дезинфекция на повърхности и медицинско оборудване.

Предимства:

- Специално проектирани за дезинфекция и почистване на неинвазивни медицински повърхности като легла и столове, медицински изделия и неинвазивно хирургическо оборудване, оборудване за рехабилитация и други труднодостъпни медицински повърхности;
- Идеален за стъклени или лъскави повърхности;
- Може да се прилага за медицински изделия в контакт с храна;
- Препоръчва се за дезинфекция на зъболекарски инструменти преди стерилизация, за отпечатъчни лъжици и силиконови отпечатъци;
- Без алдехиди или феноли;
- Широк биоциден спектър за кратко време;
- Изчиства без да оставя петна;
- Без аромат.

Микробиологична ефективност:

- Бактерицидно (включително MRSA) съгласно EN13727: 30 секунди;
- Фунгицид (Candida albicans) съгласно EN13624: 15 секунди;
- Tuberculocid (M.tetrae) съгласно 14348: 30 секунди (ниско органично натоварване), 60 секунди;
- Капсулирани вируси с обвивка (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) съгласно EN14476: 30 секунди (ниско органично натоварване), 60 секунди;
- BVD-MD съгласно EN14476: 30 секунди;
- Ротавирус съгласно EN144776: 30 секунди (ниско органично натоварване), 60 секунди;
- Norovirus съгласно EN144776: 30 секунди (ниско органично натоварване).

Състав (100g разтвор):

- 63,7 g етанол;
- 6.3 g пропан-2-ол.

Мерки за безопасност:

- Изключително запалима течност и пари;
- Избягвайте контакт с високи температури, горещи повърхности, искри, пламък и други източници на горене;
- Забранено е пушенето в близост;
- Дразни очите;
- Може да причини замаяване;
- В случай на контакт с очите - изплакнете обилно с вода за няколко минути, отстранете контактните лещи, ако е необходимо и ако това може да се направи лесно, изплакнете обилно;
- Да се съхранява на добре проветриво място;
- Контейнерът трябва да се държи плътно затворен;
- Продуктът трябва да се изхвърли в съответствие с националните разпоредби.

Начин на употреба:

- Напръскайте продукта върху желаната повърхност от разстояние от около 30 cm, като осигурите пълно покритие;
- Изчакайте формулата да влезе в действие;
- Повърхността изсъхва без следи или остатъци;
- Продуктът не трябва да се използва върху чувствителни към алкохол повърхности (акрил, естествена кожа);
- Създаден за професионална употреба.

Описание:

- Дезинфектант за повърхности Green Neutral - 1 флакон x 1 L

Дистрибутор в България:

Дентстор България ЕООД

1379 гр. София, България, Бул. Акад. Иван Евстратиев Гешов 2Е,

БЦ Сердика, сграда 5

Тел./Факс: +359 2 451 83 30

E-mail: orders@dentstore.bg

Сайт: <https://dentstore.bg/>