

Dr.Mayer Roth - Готов за употреба разтвор за почистване и дезинфекция ротативни инструменти

Предимства:

- Препоръчва се за дезинфекция на стоманени и твърдосплавни борери и фрези; диамантени, абразивни и полиращи инструменти, като: силиконови и керамични ротационни аксесоари, инструменти за ендодонтско лечение в стоматологията;
- Съдържа инхибитори на корозията, които предпазват стоманените инструменти;
- Много добри почистващи свойства за сухи органични остатъци;
- Инструментите могат да бъдат дезинфекцирани, чрез потапяне в контейнери или ултразвукови вани.

Състав (100g):

- 0.15 g N- (3-аминопропил) -N-додецилпропано-1,3-диамин; 0.14 g поли-9-окси-1,2-етандионова киселина, а- [2-9-дидецилметиламино) етил] -оксим-хидроксипропаноат.

Микробиологична ефективност:

- Бактерицидно (включително MRSA) в съответствие с EN13727, EN 14561: 15 минути;
- Фунгицид (Candida albicans) съгласно EN13624, EN14562: 15 минути;
- Микобактерицид (M.avium, M.Terraе) съгласно EN14348, EN14563: 15 минути;
- Аденовирус съгласно EN 14476: 15 минути;
- Вирус на полиомиелит по EN14476: - 15 минути;
- Капсулирани вируси (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV) съгласно EN14476: - 15 минути (ниско органично натоваване).

Мерки за безопасност:

- Вреден за водните организми, с дълготрайни ефекти;
- Не изхвърляйте в околната среда;
- Съгласно Регламент 648/2004 той съдържа <5% катионни повърхностноактивни вещества, парфюм;
- Активните компоненти отговарят на изискванията на Регламент 648/2004 за биоразградимост.

Начин на употреба:

- Веднага след употреба инструментите се поставят в неразредения разтвор;
- Всички части и отвори трябва да бъдат напълно запълнени и покрити с разтвора;
- След известно време отстранете инструментите, изплакнете и изсушете;
- В случай на видимо замърсяване, почистете инструментите с четка и отново ги въведете в разтвора;
- Инструментите се стерилизират след почистване, дезинфекция и сушене;
- Не комбинирайте с други препарати и дезинфектанти.

Описание:

- Дезинфектант за ротативни инструменти Roth - 1 x 1 L, 5L

Дистрибутор в България:

Дентстор България ЕООД

1379 гр. София, България, Бул. Акад. Иван Евстратиев Гешов 2Е,

БЦ Сердика, сграда 5

Тел./Факс: +359 2 451 83 30

Е-mail: orders@dentstore.bg

Сайт: <https://dentstore.bg/>