

Индикаторна лента

Указания за употреба:

1. Отрежете подходяща дължина от индикаторната лента, залепете на пакета, който ще стерилизирате,
2. Поставете в парен стерилизатор при 121°C за 20 минути, или с превакуиране при 134°C за 10 минути.
3. Промаяната на бледо-жълтото индикаторно мастило на лентата към тъмно-сиво или черно, показва, че стерилизацията е преминала успешно.

Артикул	Размер (WxL) mm	Пакетиране ROLL/CTN	Размер на CTN LxWxH(mm)	G.W. Kg/CTN	N.W. Kg/CTN
Лента 1950	19 x 50	117	420 x 420 x 280	14.0	13.5